



TRILASER

# LA NUOVA FRONTIERA DELL'EPILAZIONE LASER

I peli superflui, si sa, rappresentano un inestetismo fastidioso sia per le donne che per gli uomini, costringendo periodicamente a ricorrere a una soluzione (depilazione, ceretta, ...) che però non è mai "definitiva".

L'**EPILAZIONE LASER** È UNA DELLE TECNICHE PIÙ EFFICACI PER RIMUOVERE I PELI CON EFFETTI DURATURI.

Baldan Group ha ampliato l'offerta delle tecnologie di epilazione dedicata all'estetica professionale con **Trilaser**, l'innovativo macchinario che combina **efficacia, rapidità e comfort**, permettendo un'epilazione con **effetti più significativi e duraturi** rispetto alle altre tecnologie.

TRILASER

# TRIPLA LUNGHEZZA D'ONDA

## LA **CARATTERISTICA DI TRILASER**

È LA COMBINAZIONE DI TRE LUNGHEZZE D'ONDA IN UNICO MANIPOLO:

1. 808nm
2. 950nm
3. 1064nm

NEL RISPETTO DELLA  
NORMATIVA ESTETICA!

### Perché sceglierlo:

- Efficace, rapido, sicuro e indolore
- Adatto ad ogni fototipo e anche su pelli abbronzate
- 3 lunghezze d'onda laser in un unico manipolo
- Sistema di raffreddamento "Chiller"

TRILASER

# EPILAZIONE LASER RAPIDA, EFFICIENTE E CONVENIENTE

## IL MANIPOLO TRILASER,

Con la sua dimensione dello spot e le tre lunghezze d'onda, riduce significativamente i tempi di lavoro e rende i trattamenti completi e sicuri.

Le dimensioni dello spot consentono dunque di epilare rapidamente vaste aree del corpo, riducendo la durata del trattamento.

### Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni spot: 1,2cm x 2,0 cm = 2,4 cm<sup>2</sup>
- Potenza 2000 watt

# LE 3 LUNGHEZZE D'ONDA PER UN EFFETTO MASSA

Il manipolo Trilaser combina 3 lunghezze d'onda che funzionano contemporaneamente, permettendo, nell'arco della stessa seduta, di raggiungere in profondità tutta la struttura del follicolo pilifero: la 950nm più profonda della 808nm e la 1064nm più profonda della 950 nm.

IL NUMERO DI PELI CHE SI RIDURRANNO FIN DALLA PRIMA SEDUTA, SARÀ IMPRESSIONANTE!

808 nm

Ha come bersaglio la melanina presente nel bulbo pilifero, raggiungendola e liberando l'energia luminosa che brucia il bulbo.

950 nm

Ha come bersaglio l'acqua intorno al bulbo, la raggiunge e la evapora. Il bulbo muore per disidratazione.

1064 nm

Ha come bersaglio i vasi sanguigni intorno al bulbo, li raggiunge e li secca. Il bulbo muore per mancanza di nutrimento portato dal sangue.



TRILASER

TRILASER

# ANAMNESI CON TELECAMERA

Trilaser è dotato di Dermatoscopio, "l'occhio clinico" che ci permette di analizzare il pelo ed impostare tutti i parametri del macchinario. Otteniamo così parametri come :

Tipo di Pelo  
Spessore del Pelo  
Fototipo cliente  
Sensibilità individuale  
Analisi distrettuale della pelle

Questo ci permette di determinare i risultati che si possono ottenere ed in quante sedute si può raggiungere una riduzione pilifera stabile di circa il 80-90%.


Questo significa affrontare l'epilazione da vero professionista perché potrai creare un programma su misura per il tuo cliente.

Grazie a questa anamnesi scientifica si farà davvero la differenza con gli altri centri.

Quantità peli



Quantità peli

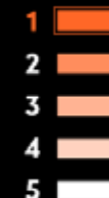

AREA / SELEZIONE

- VISO
- CORPO FRONTE
- ARTI SUPERIORI
- ARTI INFERIORI



AREA / VISO

- Basette
- Guance
- 1 Attaccatura capelli
- 2 Zigomi
- Orecchie
- Labbra
- 5 Mento





# SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO “CHILLER”

TUTTO IL GIORNO, ZERO DOLORE

Trilaser adotta il sistema di raffreddamento “Chiller” che garantisce sicurezza e comfort per il cliente e il controllo della temperatura.

Il sistema “Chiller”, è un vero e proprio gruppo refrigerante che consente un utilizzo prolungato della tecnologia: l'operatore infatti può eseguire trattamenti per tutto il giorno (anche la notte se necessario) senza neppure un attimo di sosta.

Il raffreddamento del vetrino, a contatto con la pelle, è così potente che annulla la percezione del dolore.

QUESTO SISTEMA È UN'ESCLUSIVA  
DELLE AZIENDE TOP NEL MONDO

TRILASER

# FOTORINGIOVANIMENTO

La funzione di fotoringiovanimento è una tecnica che utilizza la luce emessa dai laser a bassa potenza per stimolare la produzione di collagene e elastina nella pelle. Questa tecnica viene utilizzata per ridurre i segni dell'invecchiamento, come rughe, linee sottili e macchie scure sulla pelle. La luce del laser viene assorbita dalle cellule della pelle, aumentando la produzione di collagene e migliorando la texture e la luminosità della pelle. Il trattamento è non invasivo e non richiede tempo di recupero significativo.

TRILASER



# I VANTAGGI

## 1. EFFETTO MASSA

Aadatto anche ai peli resistenti agli altri laser con diradamento enorme già dalla prima seduta.

## 2. VELOCITÀ DI TRATTAMENTO

Per una schiena bastano 20/25 minuti.

## 3. NUOVI CLIENTI

Si possono trattare anche i peli molto chiari.

## 4. INCASSI TUTTO L'ANNO

Si possono trattare anche le pelli scure e abbronzate, lavorando quindi tutto l'anno, anche nel periodo estivo.

## 5. SISTEMA CHILLER

Trattamento completamente indolore

# TRILASER

## LE NOSTRE SEDI

Belgio  
Lussemburgo  
Francia  
Olanda  
Germania  
Austria  
UK  
Irlanda  
Svizzera  
Russia  
Kuwait  
Romania  
UAE  
Messico  
Colombia  
Turchia  
Cipro



**BALDAN**  
G R O U P  
[www.baldangroup.com](http://www.baldangroup.com)