



FACE & BODY THERMO SHOCK

L'action de la chaleur
et du froid, pour un

**EFFET
LIFTING
IMMÉDIAT**

sur le visage et le corps

BALDAN
G R O U P

www.baldangroup.com

LA NOUVELLE ÈRE DU RAJEUNISSEMENT ET DU REMODELAGE

De plus en plus de femmes et d'hommes recherchent des solutions pour améliorer leur silhouette et rajeunir leur visage, sans forcément avoir recours au bistouri.

4

4 FONCTIONS POUR DES RÉSULTATS SURPRENANTS

Pour cette raison, le Groupe Baldan a élargi son offre dédiée à l'esthétique professionnelle avec **Face Thermo Shock**, la solution innovante de rajeunissement et de remodelage de la peau qui combine 4 **fonctions**:

1. CHAUD-CHAUD
2. FROID-FROID
3. TECHNOLOGIE DMA
4. ÉLECTROPORATION

FACE & BODY THERMO SHOCK EST UNE TECHNOLOGIE HOMOLOGUÉE 4.0

EFFETS VISIBLES

VISAGE :

- Lifting instantané
- Atténuation de la couperose
- Réduction des taches
- Anti-âge
- Tonification du cou et du décolleté
- Amélioration du double menton

CORPS :

- Réduction de la graisse
- Drainage des liquides cellulitiques
- Production de collagène et d'élastine
- Augmentation du tonus cutané
- Oxygénation des tissus
- Relâchement musculaire



CONSULTATION PERSONNALISÉE

Le traitement avec **Face & Body Thermo Shock** commence par une consultation faciale et corporelle personnalisée afin de vérifier l'adéquation et l'état actuel de la peau, via un formulaire d'anamnèse à remplir en ligne, puis par la détection, grâce à une caméra vidéo d'une résolution de 5 millions de pixels, des imperfections à **traiter**.



GRÂCE À CE BILAN, IL EST POSSIBLE D'ÉVALUER :

○ HYDRATATION

○ PIGMENTATION

○ INESTHÉTISMES

○ SÉBUM

○ PORES

○ ADIPOSITÉ

○ RIDES

○ COUPEROSE

et, par conséquent, de programmer
le traitement et les cosmétiques les plus appropriés.



BILAN PROFESSIONNEL

Ce bilan met en valeur la figure de l'esthéticienne, en la plaçant au rang des plus hautes figures professionnelles, et offre ainsi au client une image de grand professionnalisme, distinguant l'esthéticienne des instituts habituels qui ne se préoccupent que du bout des lèvres des résultats. Avec Face & Body Thermo Shock, le traitement est établi après une anamnèse approfondie et les résultats sont montrés avec **des images réelles**, avant et après le traitement. À l'issue du bilan, le client peut se voir proposer l'expérience d'un lifting en une seule séance, ainsi que de nombreux autres traitements du visage et du corps.

CHAUD-CHAUD + FROID-FROID

L'objectif du traitement Face & Body Thermo Shock est l'utilisation combinée du froid et de la chaleur en alternance toutes les deux ou trois minutes. **Mais l'exclusivité de cette technologie réside dans le fait que le passage du chaud-chaud au froid-froid et vice versa se produit automatiquement en quelques instants, de manière presque incroyable.**

C'est la répétition cyclique de ce changement de température qui produit un choc thermique sur les fibroblastes du derme, comme une secousse naturelle qui les réveille. **Ainsi, les fibroblastes commencent immédiatement à produire du nouveau collagène, de l'élastine et de l'acide hyaluronique. Les coussinets graisseux seront quant à eux réduits et la silhouette définitivement redéfinie.**

2 PIÈCES À MAIN

La grande pièce à main pour effectuer les traitements étendus sur les zones du corps. La **petite pièce à main** pour les zones plus limitées telles que le visage.



Sur les pièces à main, il est également possible
d'activer
simultanément, avec l'action chaud-froid,
deux autres fonctions :

DMA & ÉLECTROPORATION



SUR LE CORPS

Les impulsions d'électrostimulation activent la contraction de la couche musculaire sous-jacente et, grâce à l'action chaud/froid exercée par la pièce à main, une utilisation directe de la graisse localisée est déterminée.

DMA ACTIVATION DYNAMIQUE MUSCULAIRE)

LA TECHNOLOGIE DMA ATTEINT LE TISSU
MUSCULAIRE EN LE RENFORCANT
ET EN LE TONIFIANT.

SUR LE VISAGE

Le chaud-froid en synergie avec la stimulation DMA crée un effet liftant et tonifiant à la fois sur la peau et les muscles de soutien : effet lifting.

ÉLECTROPORATION (VÉHICULATION TRANSDERMIQUE)

Des décharges électriques de très courte durée et pratiquement imperceptibles pour le client, qui ouvrent des pores temporairement, à travers lesquels les cosmétiques hydrosolubles peuvent être absorbés en profondeur.

Pour le visage, il est possible de renforcer le traitement en véhiculant les cosmétiques B-FILL, pour augmenter leur absorption en profondeur et améliorer le relâchement cutané et la tonification musculaire. Il s'agit **d'ampoules multi-doses** qui permettent de prélever la quantité de produit souhaitée à l'aide de n'importe quelle seringue dotée d'une aiguille. Après le prélèvement, le bouchon se referme automatiquement, assurant ainsi une hygiène parfaite ainsi que la bonne conservation du précieux produit.



Pour le corps, le traitement peut être renforcé par l'utilisation de **SUPERACTIFS**, des cosmétiques à très forte concentration de substances fonctionnelles, formulées pour libérer le principe actif pendant une période prolongée, pour une action énergique et durable.



FONCTIONNalité GPS

Le traitement Face & Body Thermo Shock fonctionne comme un navigateur par satellite.

Il suffit de sélectionner l'un des programmes prédéfinis sur l'écran et de procéder au traitement.



10



FACE & BODY
THERMO SHOCK

LES PROGRAMMES

En diversifiant la température et les temps d'application, Face Body Thermo Shock offre à l'opérateur plusieurs PROGRAMMES PRÉRÉGLÉS,, différenciés par zone et par imperfection.

VISAGE



LIFTING INSTANTANÉ

Si le client demande un traitement choc à effet immédiat, pour une soirée importante, et pour lequel un traitement qui ne laisse pas de signes est nécessaire, ce programme est idéal : il lifte les contours, repulpe et lisse les rides. Il peut être répété une fois par semaine pour des résultats plus durables.



ANTI-RIDES

Ce programme concentre toute sa puissance sur le sillon des rides, en tonifiant les muscles mimiques, en stimulant la production endogène de collagène, d'élastine et d'acide hyaluronique grâce à un degré maximal de choc thermique.



COUPEROSE

Dans ce programme, une température modérément fraîche est utilisée pour favoriser la contraction des vaisseaux dilatés par la couperose, ce qui réduit les rougeurs.



TACHES

Ce programme exploite l'action blanchissante du froid intense, qui tend également à modérer l'activité des mélanocytes. Ils sont véhiculés en profondeur par la méso-rotation, les B-FILL avec Arbutine et Vit. C.



COU ET DÉCOLLETÉ

Ce programme alterne les actions de plusieurs programmes, notamment le programme anti-taches et le programme lifting associé à une stimulation musculaire intense pour tonifier toute la zone.



DOUBLE MENTON

Dans ce programme, le choc froid-chaud est maximisé pour initier la lipolyse des adipocytes. La deuxième partie du programme comprend ensuite une action de drainage par stimulation musculaire.



TRAITEMENT DU CONTOUR DES YEUX

Dans ce programme, des températures modérées associées à une stimulation vibratoire des muscles sont utilisées pour drainer les poches des yeux et renforcer les muscles fins des rides extérieures.

CORPS

ADIPOSITÉ LOCALISÉE Différenciées pour fessier, abdomen, jambes, bras, dos, cou

CELLULITE Différenciées pour fessier, abdomen, jambes, bras, dos, cou

TONIFICATION Différenciées pour fessier, abdomen, jambes, bras, dos, cou

RELÂCHEMENT MUSCULAIRE Différenciées pour fessier, abdomen, jambes, bras, dos, cou

LES RÉSULTATS

L'aspect de la peau change dès la première séance ainsi que le tonus musculaire. La réduction des graisses et de la cellulite augmente après chaque séance et devient très évidente après 20/30 jours de traitement.

14



DURÉE DU TRAITEMENT

Nous recommandons un traitement d'au moins six séances, une ou deux fois par semaine, bien que vous puissiez déjà constater des changements dès la première. Cela donne une impulsion pour procéder : une séance par mois suffira pour entretenir les résultats obtenus.



LA DURÉE DU TRAITEMENT
VARIE DE 20 À 30 MINUTES,
SELON LES ZONES.

FACE & BODY
THERMO SHOCK

BALDAN
G R O U P
www.baldangroup.com

